

## Инструкция по использованию ушной бирки для КРС под нож-аппликатор

**Внимание! Во избежание занесения инфекций насекомыми, летом в жару мечение животных проводите рано утром или поздно вечером (в прохладное время).**

1. Заранее, до идентификации скота, нанесите специальным маркером на бирку необходимую буквенно-цифровую информацию (рис. 1). Дайте этой надписи впитаться. Для длительного сохранения обведите её несколько раз маркером.

2. Перед применением продезинфицируйте лезвие ножа-аппликатора. Рекомендуем два способа:

- протереть специальными дезинфицирующими препаратами (например, Глютекс или Веркон-С);
- обработать методом кипячения или фламбирования (над пламенем спиртовки).

3. Правильно определите точку прокола на ухе во избежание попадания в опорные хрящи (рис. 2).

4. Закрепите бирку на ноже-аппликаторе и натяните её, крепко прижимая большим пальцем руки, как показано на рис. 3.

5. Одним быстрым и резким движением проколите ухо в намеченной точке (рис. 4), чтобы фиксирующая часть бирки оказалась на обратной стороне уха, и быстро выньте лезвие ножа обратно. На рис. 5 показана правильная фиксация бирки. Процесс заживления ранки происходит в течение пяти суток. В первые дни потребуются наблюдение за процессом заживления. В случае воспаления обработайте участок дезинфицирующими средствами. По окончании работы тщательно промойте лезвие ножа-аппликатора, протрите насухо и закройте чехлом. При необходимости произведите заточку режущих кромок лезвия ножа.



Рис. 1



Рис. 2

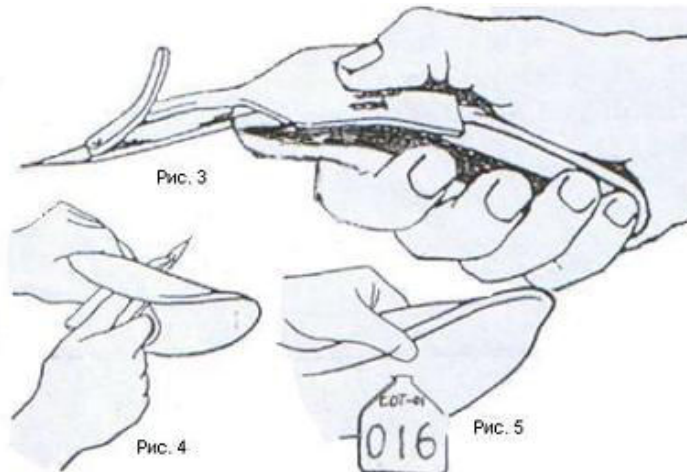


Рис. 3

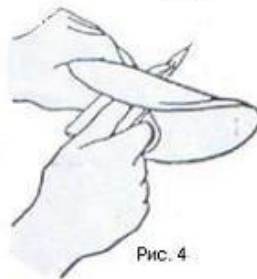


Рис. 4

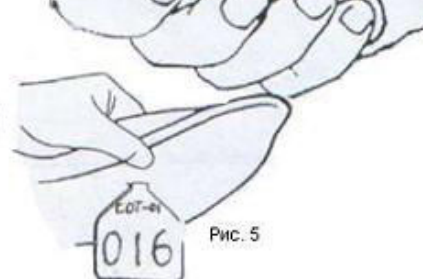


Рис. 5